

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор для полирования и препарирования зубов
методом абразивной струи
«ФЛОУ-КЛИНЗ»
для профилактической обработки зубов
ТУ 9391-011-67200978-2011
РУ № ФСР 2012/13178 от 11.03.2012 г.

ПОКАЗАНИЯ

Порошок №1 «Флоу-Клинз-профи» предназначен для удаления налета и мягких отложений с наддесневой поверхности зубов, с оголенного корня; очистки фиссур перед герметизацией; удаления пигментаций, налета курильщика и щадящего отбеливания эмали, не приводящих к гиперестезии зубов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость. С осторожностью применять к пациентам с аллергическими реакциями на пищевые ароматизаторы.
Не использовать не по назначению.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Порошок №1 «Флоу-Клинз-профи» применяется по методу пескоструйной обработки воздушно-водно-абразивной струей (Air-Flow). Порошок эффективно очищает твердые ткани, отбеливает и придает зубам здоровый блеск. В качестве абразивного компонента используется смесь карбоната и фосфата кальция с бикарбонатом натрия размером частиц 50-70 мкм, что позволяет провести щадящую чистку эмали. В составе содержится антислеживатель, лидокаина гидрохлорид (0,5%). Порошок выпускается с различными вкусами (мята, вишня, черная смородина, цитрус, мультифрукт) и нейтральный (без ароматизаторов, не содержит лидокаина гидрохлорид).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Порошок №1 «Флоу-Клинз-профи» применяют согласно инструкциям, прилагаемым к аппаратам пескоструйного типа для полирования зубов или к наконечникам импортного и отечественного производства: KaVo Profi Flex 3, Satelec Air-max, Air-Flow Handy, NSK Prophy-Mate neo, Air prophy unit.

Перед применением порошков необходимо врачу и пациенту защитить от пыли глаза очками и волосы - одноразовой шапочкой, предупредить пациента с контактными линзами о возможном попадании пыли. Углы рта пациента следует обработать вазелином, поместить слюноотсос в угол рта пациента, использовать «пылесос».

Перед применением резервуар необходимо заполнить порошком на половину объема и подобрать режим подачи струи сжатого воздуха, воды и порошка, не направляя в полость рта пациента.

Не направляя струю порошка в одну точку, а распыляя круговыми движениями, следует обрабатывать каждую поверхность зуба не более 4 секунд.

Избегать попадания влаги в порошок!

По окончании работы необходимо очистить наконечник от порошка! Не оставлять порошок в резервуаре!

ФОРМА ВЫПУСКА

Порошок №1 (банка)	220 г
Инструкция по применению	1 шт

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +5°C до +25°C.

Транспортировать при температуре от +5°C до +25°C. Допускается кратковременное воздействие температуры в пределах от -10°C до +30°C.

Несоблюдение условий хранения и транспортирования ведет к ухудшению качества и сокращению срока годности материала, за что производитель ответственности не несет.

Храните материал в упаковке с инструкцией до окончания использования.

После вскрытия упаковки срок применения материала ограничен сроком годности.

Срок годности - 3 года от даты изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ (для безопасных отходов класса А).

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «ТехноДент»

308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132А

Тел/факс +7-4722-23-14-18, 23-14-81

E-mail: zakaz@tehnodent.org