

ACROSEAL

Инструкция по применению

Состав:

База: глицерретовая кислота (эноксолон), гексаметилентетрамин, рентгеноконтрастный наполнитель

Катализатор: гидроксид кальция, диглицидиловый эфир бисфенол А (DGEBA), рентгеноконтрастный наполнитель

Свойства:

Acroseal представляет собой силер с содержанием гидроксида кальция, состоящий из двух компонентов – пасты - базы и пасты – катализатора – и предназначен для постоянной obturации корневых каналов при использовании гуттаперчевых штифтов. Acroseal не содержит эвгенол.

Показания:

Используется в качестве силера при пломбировании корневых каналов гуттаперчевыми штифтами

Противопоказания

Гиперчувствительность к одному из компонентов препарата.

Способ применения:

Поместите две полоски равной длины пасты-основы и пасты-катализатора, выдавленные из двух тюбиков на блокнот для смешивания.

Шпателем перемешивайте обе пасты до получения гомогенной консистенции. Нанесите полученную пасту на гуттаперчевый штифт и поместите штифт в канал. Конденсируйте.

Специальные предупреждения и меры предосторожности:

Особые риски:

Паста – база: опасная. Может вызвать сенсibilизацию при вдыхании и контакте с кожными покровами.

Паста – катализатор: разъедающая. Вызывает ожоги. Может вызвать сенсibilизацию при контакте с кожными покровами.

Техника безопасности:

Избегайте контакта с кожей. В случае попадания в глаза незамедлительно промойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. При контакте с кожей, незамедлительно промойте обильным количеством воды с мылом.

Замечания:

При открытии тюбика пасты-основы удалите при необходимости слой надсадочной жидкости.

Время отверждения Acroseal *in vivo* колеблется от 16 до 24 часов.

Шпатели, блокнот для смешивания и любые иные инструменты должны быть очищены спиртом или ацетоном сразу после использования.

Хранение:

Храните в прохладном месте (от 10 до 25°C).

Плотно закрывайте тюбики после каждого использования.

Форма выпуска:

Картонная коробка содержит:

1 паста-баз x 8,5 г

1 паста-катализатор x 9,5 г

1 поперечно - разлинеенный блокнот для смешивания