

Alveogyl

Инструкция по применению

Состав: Пенгхавар, эвгенол, натрия лаурилсульфат, кальция карбонат, вспомогательные вещества

Свойства:

Alveogyl представляет собой пасту, используемую в качестве хирургической альвеолярной повязки после удаления зубов, содержащую волокна Пенгхавар. Паста обладает гемостатическим действием, обеспечиваемым при сдавливании, а также предохраняет от суперинфекции (альвеолярного остита) благодаря своим защитным свойствам.

Введенный в лунку, Alveogyl легко крепится к альвеоле благодаря своей волокнистой консистенции. При нормальном заживлении раны паста постепенно удаляется с помощью движений языка и без вмешательства врача.

Alveogyl легко наносится и не требует специального наблюдения у врача, за исключением наблюдения за процессом заживления.

Показания к применению:

Alveogyl представляет собой пасту, используемую в качестве повязки при луночковом альвеолите или в качестве повязки после удаления зуба при сложном или травматическом удалении у пациентов с ранее наблюдавшимся луночковым постэкстракционным альвеолитом.

Противопоказания:

Alveogyl не следует использовать при аллергии на любой из компонентов препарата или при лечении молочных зубов (у детей до 12 лет).

Использование препарата в качестве обычной постэкстракционной повязки противопоказано.

Указания по применению:

Скатать небольшой шарик (около 0,20 г) из пасты и аккуратно поместить в подготовленную лунку зуба. Швы не накладывать.

Предупреждения и меры предосторожности при применении:

Необходимо предупреждать пациентов о том, что в течение 24 часов после удаления зуба не рекомендуется тщательно чистить зубы.

Не обрабатывать более 5 зубов за один раз.

Xi – может оказывать раздражающее воздействие

Может способствовать повышению чувствительности при попадании на кожу

Оказывает раздражающее воздействие на кожу.

Не допускать попадания в глаза

Использовать перчатки

Данный продукт и его упаковка должны утилизироваться как опасные отходы.

Упаковку следует закрывать незамедлительно после использования препарата.

Форма выпуска:

Баночка 10 г