

«АЛЬВОСТАЗ» (жгутики)
компресс гемостатический и антисептический для альвеол

Показания

Для профилактики и лечения альвеолитов.

Состав и свойства

Трикальций фосфат
Эвгенол
Масло оливковое
Вискозный жгуттик
Йодоформ

«Альвостаз» (жгутики) представляет собой специальное средство для профилактики и лечения альвеолита. Помещенный в альвеолу «Альвостаз»-жгуттик быстро снимает воспаление и боль. Материал оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно выводится наружу. Обладая слабой локальной токсичностью, не вызывает воспаления слизистой оболочки полости рта. При использовании материала как профилактического средства препараты пропитки в самое короткое время способствуют безболезненному заживлению лунки.

Противопоказания.

«Альвостаз» (жгутики) противопоказан больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода.

Способ применения

После удаления зуба необходимо провести туалет лунки. Небольшое количество жгутика аккуратно поместить в лунку. Поверх «Альвостаза» можно наложить сухой марлевый тампон. Пациента следует предупредить, что с течением времени постепенно тампон отторгнется из лунки.

Только для местного применения.

Упаковка и хранение

Баночка содержит 10 г вязкого жгутика шириной 1 см и длиной 1 м, пропитанного лечебной пастой.

Хранить в сухом холодном месте.

Срок годности – 3 года.