

# Arti-Spray, Bausch

## Артикуляционный спрей Бауш

### Назначение

Артикуляционный спрей для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов; для контроля апроксимальных контактов при припасовке мостовидных протезов либо коронок.

### Состав и свойства

Состав: физиологически нейтральные вещества.

### Особенности использования

Arti-Spray удобно дозируется и создает тонкий слой краски, которая легко смывается водой. Перед использованием содержимое аэрозольной банки необходимо взболтать, после чего нанести тонкий слой краски на окклюзионную поверхность либо на внутреннюю поверхность мостовидного протеза или коронки.

Наносить краску необходимо на расстоянии 3-5 см.

Все контактные пункты легко определяются по дефектам покрытия, которые возникают после смыкания зубных рядов либо припасовки мостовидного протеза, коронки.

Места контактных пунктов можно пометить цветным карандашом либо фольгой БаушаArti-Fo