

Дентин-паста

Временный пломбировочный материал



НАЗНАЧЕНИЕ

Временный пломбировочный материал ДЕНТИН-ПАСТА не содержит эвгенол, применяется для покрытия лекарственных препаратов в кариозных полостях зуба в качестве временных пломб.

Временный пломбировочный материал ДЕНТИН-ПАСТА приготовлен на основе цинксульфатного цемента с добавлением отдушек и красителей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Временный пломбировочный материал ДЕНТИН-ПАСТА накладывается гладилкой в заранее подготовленную и высушенную кариозную полость зуба слоем толщиной 1-2 мм. Затвердевание пасты происходит в течение 2-3 часов (пациенту рекомендуется не принимать пищу в течение этого времени).

Выводится паста из полости зуба легко рычагообразным движением экскаватора или зонда.

После взятия пасты для наложения пломбы банку необходимо плотно закрыть крышкой для предотвращения попадания влаги, способствующей затвердеванию пасты.

ФОРМА ВЫПУСКА

Паста (банка) 50 г

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранят в сухом месте в плотно закрытой таре, при температуре от +4°C до +25°C. Избегать попадания влаги!

Срок годности 2 года.