

ДЕНТИН – ПОРОШОК

ВРЕМЕННЫЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется в качестве временного пломбировочного материала для покрытия лекарственного препарата в полости зуба в процессе лечения кариеса

СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

«Дентин-порошок» представляет собой водозатворимый кальцийсодержащий цинксульфатный цемент, модифицированный добавками. При затворении порошка водой образуется пластичная вязущая паста. Временная пломба из искусственного дентина превосходно герметизирует полость зуба. «Дентин-порошок» не токсичен, не вызывает раздражения твердых и мягких тканей.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Порошок 80 г / 200 г

Инструкция по применению:

Порошок смешивают с дистиллированной водой в весовом соотношении 2:1 на стеклянной пластине до получения пластичной пасты в течение 60 секунд. Затем сразу же после приготовления цементную пасту вводят одной порцией в сформированную полость зуба с помощью гладилки. Пасту, не конденсируя, приглаживают ватным тампоном. Пломба затвердевает в течении 3-5 минут. На время твердения пломбы зуб необходимо изолировать от попадания слюны.