

## Жидкость для антисептической обработки корневых каналов зубов

### Показания

Антисептическая обработка корневых каналов и кариозных полостей.

### Состав

Антисептический раствор  
Хлоргексидин  
Эвгенол  
Вода дистиллированная

### Свойства

Состоящая из сильнодействующих бактерицидных и кортикостероидных веществ, жидкость обладает совокупностью качеств, полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей.

Практически не обладающий раздражающим действием препарат позволяет приблизиться к пульпе или апексу без риска вызвать отрицательную реакцию. Жидкость легко проникает в плохопроходимые дополнительные каналы и дезинфицирует их. Благодаря сбалансированному составу материала ослабевают воспалительные явления.

В отличие от большинства антисептиков, используемых для корневых каналов, жидкость можно совмещать с антибиотиками, что дает возможность проводить одновременную обработку антисептиками и антибиотиками.

### Способ применения

*1. Лечение в одно посещение.* Удалить всю корневую пульпу. Расширить канал с использованием эндодонтических инструментов. Промыть антисептическим раствором или дистиллированной водой, затем тщательно просушить. Ввести в канал 1 каплю жидкости на 1-2 мин. Затем ватной турундой удалить остатки жидкости и запломбировать канал.

*2. Отсроченное лечение.* После удаления пораженной инфекцией пульпы произвести расширение канала химическим и эндодонтическим методом. Затем тщательно просушить канал, поместить в него турунду, пропитанную жидкостью, и оставить на 1 – 3 дня, герметически закрыв полость временной повязкой. Во время следующего посещения пациенту можно применить постоянное пломбирование

### Упаковка и хранение

Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл.  
Хранить в сухом и темном месте.  
Срок годности – 3 года.