

**“ЙОДЕКС”**  
**паста для лечения пульпитов и периодонтитов**

**Состав**

Йодоформ  
Камфора  
Оксид цинка  
Масло оливковое  
Рентгеноконтрастный наполнитель

**Показания и свойства**

“Йодекс” применяется как профилактическое и лечебное средство при лечении пульпитов, острых или хронических периодонтитов. Паста “Йодекс” обладает дезинфицирующим и бактерицидным свойствами, повышает защитные силы периапикальных тканей, не препятствует развитию зубного зачатка. Препарат рентгеноконтрастен, в канале паста не затвердевает.

**Способ применения**

После эндодонтической подготовки проводится пломбирование канала зуба до апекса пастой «Йодекс» на 2-3 недели. После получения положительного клинического результата (с рентгенологическим контролем) проводится удаление временного пломбировочного материала, промывание канала антисептиком и заполнение его постоянным пломбировочным материалом.

**К сведению.**

“Йодекс” имеет тенденцию затвердевать на поверхности, когда баночка остается открытой длительное время. Рекомендуется: закрывать баночку после каждого применения; при необходимости перемешать пасту перед применением каким-либо сухим инструментом; в случае затвердения препарат можно размягчить любым жирным маслом (персиковое и т.п.). Как все материалы на камфорной и ментоловой основе, эту пасту следует применять с осторожностью при лечении детей младше 7 лет.

**Упаковка и хранение**

Паста для лечения периодонтитов “Йодекс” выпускается в стеклянной таре – баночках, содержащих 15 г мягкой пасты.  
Хранить в сухом, прохладном и темном месте.  
Срок годности – 3 года.