

"КАМФОРФЕН-В"
паста для пломбирования корневых каналов (готовая форма)

Показания

Пломбирование каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы.

Состав

П-хлорфенол
Сульфат бария
Камфора
Окись цинка
Тимол ментол
Сульфат цинка

Свойства

“Камфорфен-В” относится к пластичным твердеющим пастам. В состав материала, помимо классических составляющих камфорофенольной пасты – сильных антисептиков п-хлорфенола и камфоры, введены тимол и ментол, антисептическое действие которых продолжается длительное время после пломбирования.

Рентгеноконтрастный наполнитель выполнен на основе сульфата бария и окиси цинка с добавлением сульфата цинка.

Зубная влага играет двойную роль: с одной стороны, она способствует твердению, с другой – ее избыток при введении пасты в канал нежелателен, поэтому перед пломбированием следует тщательно просушить пульповую камеру и каналы прежде чем ввести пломбировочную пасту. После пломбирования паста полностью заполняет корневой канал, увеличиваясь в объеме за счет образования гидратов, что дополнительно дает очень плотную obturацию.

Способ применения

После вскрытия полости зуба провести механическую и медикаментозную обработку канала.

Пасту вводят в подготовленный корневой канал двумя-тремя порциями каналонаполнителем или с помощью ручного эндодонтического инструмента, типа римера, по часовой стрелке.

К сведению.

“Камфорфен-В” имеет тенденцию затвердевать на поверхности, когда баночка остается открытой длительное время. Рекомендуется закрывать баночку после каждого изъятия порции пасты; при работе использовать только сухие инструменты; в случае затвердения препарат можно размягчить добавлением триацетина (производное глицерина). Для ускорения процесса твердения перед введением пасты в канал можно добавить каплю дистиллированной воды.

Упаковка и хранение

Паста “Камфорфен-В” выпускается в стеклянной таре – баночках, содержащих 20 г мягкой, готовой к употреблению пасты.

Хранить в сухом, прохладном и темном месте.

Срок годности – 2 года.