

Canal+

Инструкция по применению

Состав:

водорастворимый лубрикант, ЭДТА, пероксид водорода.

Свойства:

Благодаря своему составу гель Canal+

- Смазывает и облегчает прохождение инструментов
- Делает формирование более эффективным
- Образование пены облегчает удаление продуктов распада из корневого канала

Показания:

Способствует препарированию корневого канала

Способ применения:

Canal+ должен применяться последовательно:

- Смазать инструмент гелем
- Провести механическую обработку канала до желаемого размера
- Промыть раствором гипохлорита натрия (2% - 5%).

Методика:

1. Пульповая камера

- Изолируйте зуб, используя для этих целей коффердам;
- Вскройте и раскройте полость зуба обычным методом;

Если используете шприц:

Наденьте аппликатор (канюлю) на шприц с Canal+;

Если используете упаковку с однократной дозой:

Вскройте упаковку, используя режущий инструмент;

- Нанесите Canal+;
- Промойте раствором гипохлорита натрия для удаления детрита пульпы и обеспечения доступа к устьям корневых каналов;
- Удалите жидкость из пульповой камеры.

2. Корневые каналы

Способы использования Canal+ могут отличаться в зависимости от особенностей анатомического строения корневого (-х) канала (-ов). В любом случае следует избегать неправильного направления препарирования канала. Для препарирования широких и относительно прямых корневых каналов Canal+ можно использовать, начиная уже с первого инструмента. При работе с узкими, облитерированными, анатомически сложными каналами необходимо определить рабочую длину и пройти канал перед нанесением Canal+. Предварительно согните инструмент и отметьте рабочую длину с помощью стоппера.

Затем нанесите Canal+ на инструмент обычным способом, промойте раствором гипохлорита натрия, высушите.

Внимание!

Следует избегать использования Canal+ до последнего номера инструмента.

Хотя Canal+ очень хорошо растворяется в воде, нужно следить за тем, чтобы материал был тщательно удален из корневого канала.

Нельзя оставлять Canal+ в зубе до следующего посещения!

Предостережение:

Коррозионный. Вызывает ожоги.

В случае попадания в глаза, немедленно обильно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью. Используйте защитную одежду, перчатки и защиту для глаз.

Хранение:

Хранить в прохладном месте (от 2°C до 8°C)

Форма выпуска:

шприц 5г, 15 канюль.

