

**“КАРИЕС ИНДИКАТОР”**  
**средство для обнаружения пораженного кариесом дентина**

**Показания**

“Кариес индикатор” позволяет легко различить пораженный кариесом и деминерализованный слой дентина путем окрашивания в ярко-красный цвет наружных слоев кариозного дентина.

“Кариес индикатор” не окрашивает нормальный дентин и здоровую эмаль.

**Состав и свойства**

Пропандиол  
Вода дистиллированная  
Натрий ДДЦ  
Эозин-Б

“Кариес индикатор” соединяется с денатурированным коллагеном, содержащимся в кариозном дентине, и окрашивает его за 10 секунд.

**Способ применения**

После этапов раскрытия кариозной полости и некрэктомии очистить и тщательно промыть водой обрабатываемый участок.

Осушить обрабатываемый участок потоком воздуха. Избыточная влага будет препятствовать эффективному процессу окрашивания. Нанести каплю “Кариес индикатора” из флакона-капельницы на прилагаемый блокнот. Используя микрокисточки или хлопковые шарики, внести “Кариес индикатор” в кариозную полость на 10 секунд. Промыть обрабатываемую полость водой, одновременно применяя слюноотсос, а затем просушить струей воздуха. Удалить окрашенный в красный цвет инфицированный дентин. Повторять процедуру до тех пор, пока дентин не перестанет окрашиваться, что свидетельствует об отсутствии инфицированных участков.

Когда весь окрашенный материал будет удален, повторить процедуру со свежей каплей красителя. По окончании тщательно промыть и осушить полость. После этого приступить к дальнейшим манипуляциям.

**Упаковка и хранение**

“Кариес индикатор” расфасован по 8 г раствора во флакон-капельницу.

Хранить при t° от +4°С до +24°С.

Срок годности – 3 года.

Защищать от попадания прямых солнечных лучей.