

**“НОН АРСЕНИК”**  
**материал стоматологический для девитализации пульпы зуба**

**Показания**

- девитализация пульпы без применения мышьяка;
- дополнительное средство для девитализации с применением мышьяка при повторной процедуре.

**Свойства**

Препарат содержит триоксиметилен – сильный антисептик, который в высоких концентрациях вызывает некроз тканей. Используется в составе девитализирующих паст для некротизации пульпы зуба, обладает пролонгирующим действием. Девитализация наступает через 5 – 7 дней. Не оказывает токсического действия на ткани периодонта. Лидокаин своим локальным анестезирующим действием уменьшает опасность возникновения болезненной реакции.

**Состав**

Триоксиметилен  
Камфора  
Лидокаин  
П-хлорфенол  
Наполнитель

**Способ применения**

Паста для девитализации пульпы накладывается без давления на вскрытый рог пульпы в виде шарика диаметром 1-2 мм. Кариозную полость закрывают без давления мягкой временной повязкой. Срок действия препарата 5 – 7 суток. В результате пульпа приобретает волокнистую структуру и ее очень легко удалить.

В некоторых случаях такую технику обработки использовать очень сложно, потому что не всегда удается достичь прямого контакта с пульпой. В этом случае надо проводить девитализацию в два этапа. Прямой контакт может быть достигнут лишь на втором этапе после снижения жизнеспособности пульпы.

**Упаковка и хранение**

Паста для девитализации пульпы “НОН АРСЕНИК” выпускается в стеклянной таре – баночках, содержащих 6,5 г пасты.  
Пасту хранить в прохладном месте.  
Срок годности – 2 года.