

“ПолирПаст-D – Сухой блеск”

паста с алмазным наполнителем для окончательной полировки до состояния сухого блеска композитов и керамики

Показания

Паста для окончательной полировки до состояния сухого блеска поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отверждения и керамики.

Состав

Алмазный абразив
Водорастворимая полимерная основа
Силиконовые добавки
Стабилизатор
Ароматизатор

Свойства

Принцип действия “ПолирПаст-D – Сухой блеск” основан на специфических абразивных свойствах мелкодисперсного алмазного порошка.

Благодаря этим свойствам алмазный абразив производит окончательную полировку до состояния сухого блеска сформированной пломбы из композитных материалов.

Способ применения

Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку или щетку необходимое количество “ПолирПаст-D – Сухой блеск”. Обработку вести 1-3 мин. на средней скорости, не превышая 8-10 тыс. об/мин. и не оказывая чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

Упаковка и хранение

Материал “ПолирПаст-D – Сухой блеск” расфасован в два шприца по 3 мл.
Хранить при температуре от +4°C до +24°C.
Срок годности – 3 года.