

**“ПолирПаст-Z + W”
паста для отбеливания и тонкой полировки эмали зубов**

Показания

- окончательная полировка и отбеливание эмали после удаления зубного камня;
- снятие мягкого зубного налета механическим способом;
- отбеливание эмали зубов.

Состав

Мелкодисперсный абразив
Перекись карбамида
Каолин
Оксид цинка
Диоксид титана
Силиконовые добавки
Наполнитель
Ароматизатор

Свойства

Принцип действия “ПолирПаст-Z+W” основан на специфических свойствах мелкодисперсного абразива и отбеливающих свойствах перекиси карбамида. Комбинация аминофлюорида с нитратом калия способствует насыщению эмали ионами фтора и снятию чувствительности эмали.

“ПолирПаст-Z+W” снимает мягкий зубной налет, не повреждая эмали, производит отбеливание, позволяет достичь максимального эстетического эффекта.

Способ применения

Нанести на полировальную головку необходимое количество “ПолирПаст-Z+W”. Обработку вести на средней скорости и небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. Полировку поверхности производить до желаемого результата. После окончания процедур смыть остатки пасты водой.

Упаковка и хранение

Материал “ПолирПаст-Z+W” расфасован в пластиковую банку по 40 г.
Хранить при температуре от +4°С до +24°С.
Срок годности – 3 года.