

**“ТРАВЕКС-37”
гель для протравления дентина и эмали**

“ТРАВЕКС-37” – это гель с оптимальным содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации – 37%. Оптимально подобранная вязкость геля обеспечивает максимальную рабочую характеристику. После нанесения на обрабатываемую поверхность не растекается, хорошо фиксируется на месте аппликации.

Способ применения

Снять защитный колпачок со шприца и насадить на его место канюлю для аппликации. Нанести путем выдавливания гель на обрабатываемый участок эмали и оставить на 20-25 сек. Удалить гель с обрабатываемого участка обильным орошением водой, пользуясь слюноотсосом и пылесосом. Просушить до полусухого состояния. Обработанная поверхность готова для дальнейших манипуляций.

Предупреждение. Поскольку гель содержит фосфорную кислоту – избегать попадания на слизистую оболочку и в глаза. В случае попадания на слизистую обильно промыть водой.

Упаковка и хранение

Материал расфасован в три шприца по 3,5 мл. В комплектацию входит 20 сменных канюль-аппликаторов.

Хранить в сухом прохладном месте.

Рекомендуемая t° хранения от +4°C до +24°C.

Срок годности – 3 года.