

**“ФТОРЛАК” (прозрачный)
материал – жидкость противокариесная профилактическая**

Показания

- после снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов;
 - *на терапевтическом приеме*: при кариесе в стадии пятна, клиновидных дефектах, при лечении гиперстезии, после полировки эмали;
 - *на ортопедическом приеме*: для защиты живой культи отпрепарированного зуба, при обработке контактных поверхностей соседних зубов, при фиксации кламерных конструкций;
 - *на пародонтологическом приеме*: после кюретажа пародонтальных карманов для защиты шеек зубов, прицervикальной гиперстезии;
 - *лечение и профилактика кариеса у детей*: сохранение молочных зубов, при пигментированных глубоких фиссурах постоянных зубов, в стадии созревания фиссур, при незрелых фиссурах.

Состав и свойства

“Фторлак” (прозрачный) представляет собой бесцветную суспензию. Активным компонентом является аминофлюорид, процентное соотношение которого сбалансировано для достижения максимального противокариесного эффекта. Аминофлюорид (соединение фтора нового поколения) обладает повышенной активностью.

Способ применения

Зубы предварительно изолировать от слюны. Высушить изолированные зубы воздухом из пюстера. На высушенную поверхность зубов нанести тонким слоем “Фторлак” с помощью обычных аппликаторов типа “микробраш”. Через 10-15 сек. “Фторлак” высохнет самостоятельно. При необходимости его можно подсушить сжатым воздухом. Можно нанести второй слой лака и подсушить воздухом для скорейшего высыхания. Пациента следует предупредить о том, что не следует принимать твердую пищу в течение 2-х часов и не проводить чистку зубов в течение 12 часов после проведения процедуры. Для поддержания противокариозного эффекта повторное покрытие необходимо проводить через 3-6 месяцев.

В процессе применения следует плотно закупоривать флакон, чтобы избежать испарения растворителя и последующего подсыхания и загустения лака.

Возможно выпадение осадка, не влияющего на физико-химические свойства материала. Перед употреблением взболтать!

Упаковка и хранение

“Фторлак” расфасован во флакон емкостью 13 мл.

Хранить следует плотно закупоренным в сухом и темном месте при t° от +4°С до +24°С.

Срок годности – 3 года.