

“ЭДЕТАЛЬ жидкость”
жидкость для химического расширения корневых каналов зубов

Показания

- химическое расширение каналов зубов;
- выявление устья каналов.

Состав

Соль ЭДТА
Трилон Б
Ароматизатор
Наполнитель

Свойства

Для более успешного расширения корневых каналов применяется химический способ, заключающийся в декальцинации стенок канала. Сильнодействующие кислоты, используемые в настоящее время для расширения каналов, представляют собой неудобство, поскольку являются сильными каустиками и опасны в обращении.

Предлагаемый материал представляет собой нейтральный раствор, который, соединяясь с минеральными компонентами зуба, образует комплексные хелатные соединения, оказывающие лишь слабое сопротивление механическому воздействию.

Материал нетоксичен, не является каустиком, абсолютно безвреден для периапикальных тканей, прост в употреблении, позволяет осуществлять удаление остаточной девитализированной пульпы и дентина таким образом, что механическое расширение с использованием эндодонтических инструментов выполняется без труда даже в самых узких каналах.

Способ применения

С помощью пипетки ввести раствор в каналы зуба, используя для этого корневую иглу. Выдержать некоторое время (1-2 мин.) и после этого начать расширение канала. По окончании процедуры промыть водой.

Упаковка и хранение

Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл.

Хранить в сухом и теплом месте. При понижении температуры хранения свойственно выпадение растворенной соли в осадок, легко устранимое подогреванием раствора.

Срок годности – 3 года.