

## BLUE ETCH 10МЛ

### СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОТРАВКА

активная субстанция: 36% о-фосфорная кислота

- Идеально подобранная гелевая консистенция
- Тиксотропные свойства
- Легко вымывается
- Отлично прилипает к эмали
- Цвет, подобранный соответствующим образом

### Применение

Протравка применяется для протравливания эмали и дентина перед применением композитных материалов, композита для фиссур и углублений.



### Способ использования

На осушенную поверхность нанести тонкий слой геля. Протравливать не больше 60 секунд. Промыть сильной воздушно-водяной струей (15-20 секунд). Не пересушивать. В случае

загрязнения эмали,  
повторить процесс.



**Формы выпуска:**

- **BLUE ETCH 10мл**, шприц с гелем 10мл, переходник для перекачки геля; шприц 2мл;