

FORFENAN

Инструкция по применению

Состав:

Порошок:

Эноксолон	1,00 г
Сульфат бария	49,00 г
Наполнитель q.s.ad	100,00 г

Лечебная жидкость:

35% раствор формальдегида	80,00 г
Наполнитель q.s.ad	100,00 г

Жидкость для отверждения:

Резорцинол	25,00 г
Соляная кислота	13,00 г
Наполнитель q.s.ad	100,00 г

Показания:

Пломбирование инфицированных корневых каналов постоянных и временных зубов.

Способ применения:

Подготовить и обработать канал одним из классических методов; полностью удалить остатки пульпы: провести механическую обработку канала с использованием препаратов для химического расширения корневых каналов зубов (гипохлорит натрия, перекись водорода и т.д).

Тщательно высушить.

Для приготовления пломбировочной пасты смешать на блоке для замешивания одну мерную ложку порошка с одной каплей каждой жидкости. Для получения более рыхлой консистенции пасты, например, когда предусматривается дальнейшее эндодонтическое лечение, используется одна мерная ложка порошка с одной каплей жидкости для отверждения и двумя каплями лечебной жидкости.

Запломбировать канал, используя приготовленную таким образом пасту.

Меры предосторожности при использовании:

Не глотать. Хранить в недоступном для детей месте.

Лечебная жидкость: Т – токсична (содержит формальдегид).

Токсична при вдыхании, контакте с кожей, проглатывании. Вызывает ожоги.

Возможны необратимые последствия. Способна вызвать чувствительность при контакте с кожей.

Жидкость для отверждения: Хп – токсична; N – опасна для окружающей среды (содержит резорцинол).

Раздражает глаза и кожу. Вредна при проглатывании.

При контакте с глазами промыть незамедлительно водой и проконсультироваться с врачом.

Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки, маску и очки.

При травмировании или при плохом самочувствии незамедлительно обратиться за медицинской помощью (по возможности показать врачу этикетку),

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания в окружающую среду.

Форма выпуска:

Набор включает:

1 флакон, содержащий 20 г порошка с мерной ложкой

1 флакон, содержащий 10 мл лечебной жидкости

1 флакон, содержащий 10 мл жидкости для отверждения

1 блок для замешивания

