



pro • glider™

"Ковровая дорожка" с помощью
одного инструмента



"ковровая дорожка"
быстро и просто

+
WE
KNOW
ENDO.



www.dentsplycis.com



ТОЛЬКО ОДИН инструмент для создания ковровой дорожки

Важным шагом в эндодонтическом лечении является процедура создания "ковровой дорожки" для обеспечения пути корневого канала до использования систем формирующих инструментов. Традиционно, "ковровая дорожка" формируется с помощью ручных инструментов. PROGLIDER™ предлагает несколько преимуществ по сравнению с ручными инструментами для создания "ковровой дорожки":

сохранение анатомии корневого канала

PROGLIDER™ больше сохраняет анатомию корневого канала при создании "ковровой дорожки", чем ручные инструменты, используя которые трудно избежать транспортировку, образование ступенек и смещения апекса корневых каналов.



Рис 1. PROGLIDER™



Рис 2. Стальной ручной инструмент.


Отклонения при формировании "ковровой дорожки" (уступы, ступеньки, транспортировка канала, смещение апекса).

Значительно меньше отклонений с PROGLIDER™ (рис 1) по сравнению с ручными стальными инструментами (рис 2). Берутти и др. 2013.

только один файл, меньше времени для создания "ковровой дорожки"

Достаточно только одного инструмента PROGLIDER™ для более быстрого создания "ковровой дорожки с сохранением анатомии корневого канала по сравнению с ручными инструментами или другими машинными инструментами.

На 40% меньше времени необходимо для создания ковровой дорожки с помощью PROGLIDER™ чем с помощью ручных стальных инструментов

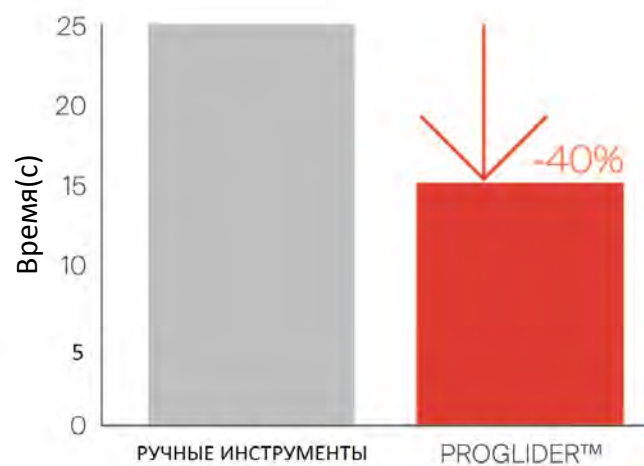

PROGLIDER™ - ротационный NiTi инструмент для создания "ковровой дорожки" для всех стоматологов, которые используют NiTi инструменты для разработки корневых каналов и, которые ценят эффективность, простоту и безопасность.

PROGLIDER™ подходит для обработки большинства корневых каналов

В том числе и сильно искривленных корневых каналов



эндо решение

pro • glider™
+
PROTAPER • NEXT™

простота и гибкость

PROGLIDER™ применяется для большинства корневых каналов, в том числе и сильно искривленных, сохраняя анатомию корневых каналов. Превосходное решение совместно с PROTAPER NEXT™.



открывая мир

Повышающихся медицинских стандартов

DENTSPLY Maillefer поддерживает высокие стандарты эндодонтического лечения, поэтому инструменты PROGLIDER™ выпускаются в стерильных блистерных упаковках и предназначены для одноразового использования для каждого пациента. Это дает дополнительные преимущества:

эффективность и экономия времени

Нет необходимости в повторной стерилизации и использовании нескольких файлов PROGLIDER™



сниженный риск поломки инструмента

Одноразовое использование инструментов на одном пациенте повышает безопасность пациента и уменьшает риск поломки инструмента из-за циклической усталости во время эксплуатации



улучшенная режущая способность

Исследования показали, что многократное использование инструментов фактически снижает их режущую способность и влияет на качество работы стоматолога и удовлетворенность пациента



отсутствие риска перекрестного заражения

Независимо от степени качества стерилизации инструмента, исследования показывают, что некоторые бактерии и остатки зубных тканей могут оставаться на инструменте, тем самым увеличивая риск перекрестного заражения между пациентами



- Изготовлен из NiTi сплава **M-WIRE®**, который характеризуется гибкостью и высокой устойчивостью к циклическим нагрузкам



- Размер кончика **16 .02** с переменной конусностью

- Ротационные движения **300 об/мин**
Торк от 2 Н/см^2 до 5.2 Н/см^2 в зависимости от стоматологического опыта врача

БЛИСТЕР ИЗ 6 ИНСТРУМЕНТОВ

A092622100103 **PROGLIDER** стерильный файл **21мм** 016 .02 21мм блистер из 6 файлов

A092622500103 **PROGLIDER** стерильный файл **25мм** 016 .02 25мм блистер из 6 файлов

A092623100103 **PROGLIDER** стерильный файл **31мм** 016 .02 31мм блистер из 6 файлов

БЛИСТЕР ИЗ 3 ИНСТРУМЕНТОВ

A092322100103 **PROGLIDER** стерильный файл **21мм** 016 .02 21мм блистер из 3 файлов

A092322500103 **PROGLIDER** стерильный файл **25мм** 016 .02 25мм блистер из 3 файлов

A092323100103 **PROGLIDER** стерильный файл **31мм** 016 .02 31мм блистер из 3 файлов



DENTSPLY
MAILLEFER
www.dentsplycis.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
"ДЕНТСПЛАЙ ЛИМИТЕД" В УКРАИНЕ
03035, УКРАИНА, Г. КИЕВ,
УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ, 2
ТЕЛ.: +38 (044) 520 13 23,
ФАКС: +38 (044) 520 13 28

CE
045 9