

## **Racestyptine**

### **Инструкция по применению**

#### **Состав:**

Гексагидрат хлорида алюминия 25% m/V, оксиквинол, гидроалкогольное индифферентное вещество

#### **Свойства:**

Хлорид алюминия имеет вяжущий эффект. Он вызывает местный гемостаз и сокращение верхних слоев свободного края десны за счет преципитации тканевых и сывороточных белков.

#### **Показания:**

- экссудация и десневые геморрагии
- ретракция десны путем импрегнации нити

Способ применения

#### ***Экссудация и десневые геморрагии***

С помощью пипетки или ватного тампона нанести одну-две капли раствора на десну. Подождать 1 – 2 минуты и тщательно промыть область нанесения раствора.

#### ***Ретракция десны***

Поместить ретракционную нить в десневую бороздку и пропитать нить несколькими каплями раствора, используя пипетку. Оставить нить на 3 – 5 минут, потом удалить, убедившись, что в десневой бороздке не остались фрагменты нити. Тщательно промыть.

Противопоказания

Возможная аллергия на алюминий

Гиперчувствительность или фотосенсибилизация к хинолиновому компоненту.

#### **Меры предосторожности при использовании:**

- Для получения требуемого эффекта использовать количество капель, необходимое для этого
- Максимально ограничить время контакта раствора с поверхностью слизистой оболочки.
- Как только местное кровотечение остановлено или оттиск снят, тщательно прополоскать зону действия, чтобы не допустить отложения солей алюминия, которые могут оказывать раздражающее действие.
- Не использовать для дополнительной пропитки импрегнированной нити
- Не глотать

Огнеопасно

Xi – оказывает раздражающее действие на глаза и кожу.

В случае попадания в глаза, немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к специалисту. Носить соответствующие перчатки.

#### **Хранение:**

Хранить при температуре не выше 25°C.

#### **Форма выпуска:**

Флакон 13 мл и пипетка.