

## **SEPTOJECTXL**

### **Инструкция по применению**

Непосредственно перед использованием удалите стерильное укупорочное средство, поворачивая обе части защитной оболочки в противоположном направлении.

Полностью отделите обе части защитной оболочки, сняв колпачок и освободив конец иглы, который будет устанавливаться на шприц.

Ввинтите пластиковый наконечник в резьбовой поршень шприца, удерживая вторую часть оболочки, закрывающей другой конец иглы.

Непосредственно перед инъекцией аккуратно снимите пластиковую защитную оболочку. Защитная оболочка может вновь использоваться при снятии иглы со шприца во избежание травмы.

Аккуратно выкручивайте иглу из шприца, используя пластиковую защитную оболочку или другое средство, во избежание травмы.

Поместите использованные иглы в проколостойкий контейнер в соответствии с применимыми правилами утилизации медицинских отходов.

### **Полезные советы для первого использования SEPTOJECTXL**

Поскольку иглы SEPTOJECTXL имеют большее отверстие, для инъекции требуется меньше усилий.

Превосходная гибкость игл SEPTOJECTXL способствует мягкому введению иглы.

### **Предупреждение**

Чрезмерное физическое усилие может привести к поломке иглы.

Избегайте чрезмерных неоднократных движений иглой во время выполнения инъекции, поскольку это может привести к поломке иглы

**НЕЛЬЗЯ НАДЕВАТЬ ПОВТОРНО КОЛПАЧОК НА ИГЛУ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ**

Нельзя сгибать, ломать или работать с иглой голыми руками, без использования защитных средств

Использовать до истечения срока годности, указанного на внешней упаковке

Пользователь несет полную ответственность за невыполнение предостережений.

### **Форма выпуска**

100 съемных одноразовых стоматологических игл