


# smartprotect® soft

Уменьшающий чувствительность раствор

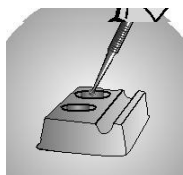

## Использование в практике:

Очистить поверхность и просушить. Обеспечить сухость рабочего поля ватными роликами. «smartprotect®» нанести на дентин аппликационной при помощи «smartbrush» и втирать в дентин в течении 10 секунд. Излишки осторожно раздуть струей воздуха и просушить. Дентин не пересушивать. Продолжить запланированное лечение.

## Важные указания по обработке:

- Бутылочку после использования закрывать..
- Излишки «smartprotect® soft» всегда тщательно удалять
- После завершения работы основательно прополоскать полость рта
- Избегать попадания в глаза, контакта с кожей и слизистой оболочкой. При попадании в глаза их следует сразу же тщательно промыть водой и обратиться к окулисту.



## Информация

smartprotect® soft

Стандартная

упаковка:

5 ml bottle

20 x smartbrush

5 x disposable dual dishes

03551

smartbrush, белый 02642 100 pcs.

## для заказа:



## Область применения:

- Снижение повышенной чувствительности эмали и дентина или постоперативной чувствительности

## Технические характеристики:

- **Объём:**  
5 ml бутылочка
- **Цвет:**  
бесцветный
- **Время воздействия:**  
20сек.
- **Хранение:**



# DETAX

Madison  
Ettlingen  
GmbH & Co. KG  
Carl-Zeiss-Str. 75 Ettlingen/Germany  
Telefon 07243/510-0 · Fax 07243/510-100  
www.detax.de · post@detax.de

