

## **Жидкость для сушки и обезжиривания корневых каналов зубов**

### **Состав**

Этилацетат  
Ацетон  
Медицинский антисептический раствор 95%-ный

Предлагаемый материал предназначен для быстрого высушивания и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием, а также для обработки зубов, препарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов.

Жидкость не препятствует полимеризации композитных пломбировочных материалов.

Жидкость экономична в употреблении и помогает в решении многих проблем. Препарат не предназначен для снятия жира с десен.

### **Способ применения**

Обработать кариозную полость зуба перед пломбированием ватным тампоном, смоченным в жидкости. Подождать несколько секунд до полного испарения жидкости.

### **Упаковка и хранение**

Флакон содержит 13 мл или 25 мл жидкости.  
Закрывать флакон после каждого применения.  
Хранить в сухом прохладном месте.  
Срок годности – 3 года.