

“ПолирПаст-D – Финиш”
паста с алмазным наполнителем для окончательной полировки композитов и керамики

Показания

Полировальная паста для окончательной (финишной) полировки поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отверждения и керамики.

Состав

Алмазный абразив
Водорастворимая полимерная основа
Силиконовые добавки
Стабилизатор
Ароматизатор

Свойства

Принцип действия “ПолирПаст-D – Финиш” основан на специфических абразивных свойствах мелкодисперсного алмазного порошка.

Благодаря этим свойствам алмазный абразив производит окончательную полировку сформированной пломбы из композитных материалов.

Способ применения

Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку или щетку необходимое количество “ПолирПаст-D – Финиш”. Обработку вести 1-3 мин. на средней скорости, не превышая 8-10 тыс. об/мин. и не оказывая чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

Упаковка и хранение

Материал “ПолирПаст-D – Финиш” расфасован в два шприца по 3 мл.
Хранить при температуре от +4°C до +24°C.
Срок годности – 3 года.