

**“ПолирПаст-Z”**  
**паста для удаления камней и окончательной полировки пломб**

**Показания**

- полировка поверхности корня после удаления зубного камня механическим способом;
- окончательная полировка пломб из композиционных материалов химического и светового отверждения.

**Состав**

Мелкодисперсный абразив  
Связующие компоненты  
Наполнитель  
Ароматизатор  
Силиконовые добавки

**Свойства**

Принцип действия “ПолирПаст-Z” основан на специфических полирующих свойствах мелкодисперсного абразива, используемого в “ПолирПаст-Z”. Благодаря этим свойствам “ПолирПаст-Z” снимает мелкий зубной камень и полирует ткани зуба, не повреждая их. Кроме того, при окончательной полировке композитных пломб “ПолирПаст-Z” придает им блеск.

**Способ применения**

Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку необходимое количество “ПолирПаст-Z”. При снятии зубных камней обработку вести на средней скорости и небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. При обработке пломб скорость можно довести до 8-10 тыс. об/мин. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

**Упаковка и хранение**

Материал “ПолирПаст -Z” расфасован в пластиковую банку по 40 г пасты.  
Хранить при температуре от +4°C до +24°C  
Срок годности – 3 года.  
Защищать от попадания прямых солнечных лучей.