

“ПолирПаст-Z + F”
паста для удаления мягкого налета и тонкой полировки эмали зубов

Показания

- снятие мягкого зубного налета механическим способом;
- окончательная полировка тканей зуба после удаления зубного камня;
- фторирование эмали зубов;
- антисептическая обработка эмали.

Состав

Мелкодисперсный абразив
Связующие компоненты
Фторсодержащие компоненты
Наполнитель
Силиконовые добавки
Ароматизатор

Свойства

Принцип действия “ПолирПаст-Z+F” основан на специфических полирующих свойствах мелкодисперсного абразива с добавлением фторирующих компонентов.

Благодаря этим свойствам “ПолирПаст-Z+F” снимает мягкий зубной налет не повреждая эмали.

Способ применения

Нанести на полировальную головку необходимое количество “ПолирПаст-Z+F”. Обработку вести на средней скорости и небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. Полировку поверхности производить до желаемого блеска. После окончания процедур смыть остатки пасты водой.

После удаления зубного налета необходимо устранить всякого рода неровности, что предотвратит новые образования зубного камня. Окончательной полировкой довести поверхность до идеально гладкого состояния и провести герметизацию поверхности препаратом “Фторлак”.

Упаковка и хранение

Материал “ПолирПаст-Z+F” расфасован в пластиковую банку по 40 г.

Хранить при температуре от +4°С до +24°С.

Срок годности – 3 года.