


Alveogyl

Сухая лунка? Боль можно облегчить!

Alveogyl – идеальный материал для наложения повязки при лечении альвеолита, т.к. он быстро облегчает боль и удобен в применении. Также Alveogyl можно использовать в качестве повязки после удаления зуба.

Alveogyl – самоэлиминирующийся препарат для одноэтапного лечения, при котором не требуется наложение швов и какой-либо особый контроль. Необходимо только наблюдать за процессом заживления. Alveogyl оказывает успокаивающее воздействие на ткани альвеолы и, таким образом, способствует быстрому купированию болевого синдрома. Материал имеет волокнистую структуру, т.к. содержит волокна Пенгхавар. Поэтому он легко вводится в лунку и обладает хорошей адгезией к альвеоле.

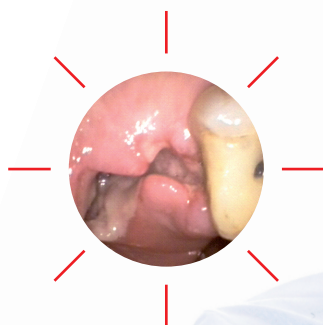

Чтобы заказать Alveogyl, свяжитесь
с дилером в вашем регионе

Характеристики Alveogyl

Характеристики	Свойства	Преимущества
Содержит волокна Пенгхавар	Волокнистая структура	Простая процедура введения препарата в лунку и хорошая адгезия к альвеоле на протяжении всего периода заживления
Повязка для лечения альвеолита	Оказывает успокаивающее воздействие на альвеолярные ткани на протяжении всего периода заживления	Способствует быстрому купированию болевого синдрома
Без наложения швов	Не требуется особый контроль. Необходимо только наблюдать за процессом заживления	Удобство и простота применения
Препарат самоэлиминирующийся	Одноэтапная процедура	Повторные посещения не требуются

Показания

Alveogyl можно использовать в качестве повязки для обработки раны после сложной либо травматической операции по удалению зуба, если в анамнезе пациента упоминается постэкстракционный альвеолит.

Инструкция по применению

- Возьмите небольшой шарик (приблизительно 0,20 г) из пасты Alveogyl.
- Аккуратно поместите шарик в обработанную лунку.
- Не накладывайте швы.

Информация о продукте



Alveogyl

Баночка, 10 г

