



WHITEsmile®

POWER WHITENING YF40%
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
ОТ НЕМЕЦКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЧТУП «ВМК-Дент»
РБ, 220012 г. Минск, ул. Академическая, 17
Тел.: (+375 17) 331 13 88, 331 14 30
Тел.моб.: +375 29 684 89 10 (velcom)
+375 29 597 94 49 (МТС)
www.vmk-dent.by
shop.vmk-dent.by

WHITEmile – немецкая компания, которая в 1994 году одной из первых в Европе начала специализироваться в области производства продуктов для профессионального отбеливания зубов. Материалы WHITEmile являются результатом собственных исследований и 100% «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ». Продукция WHITEmile клинически протестирована и сертифицирована как изделия медицинского назначения.

ПОЧЕМУ ОТБЕЛИВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ?

Отбеливание зубов:

- Минимально инвазивное лечение - эстетика улыбки
- Пациенты с отбеленными зубами в большей степени заботятся о красоте своей улыбки и более мотивированы к тщательной гигиене полости рта

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Все реставрационные материалы не подвергаются изменению цвета (не становятся белее наряду с естественными зубами) во время процедуры отбеливания

Перед процедурой отбеливания необходимо проведение обследования полости рта с целью диагностики кариеса и некариозных дефектов твердых тканей зуба, которые должны быть

обязательно лечены в случае их выявления

Обязательным является проведение профессиональной гигиены полости рта, так как участки зуба, на которых присутствуют зубные отложения, хуже подвергаются отбеливанию, чем чистые участки.

В ряде случаев профессиональная гигиена полости рта может привести к результату, которого ожидает пациент. Тогда в отбеливающей процедуре нет необходимости.



НАРУЖНЫЕ ДИСКОЛОРАЦИИ:

Дисколорации, связанные с возрастом

Еда, напитки и табак

Чай, кофе, красное вино, фрукты, специи, кока-кола, курение и др.

Лекарственные средства

Некоторые лекарственные средства могут вызывать дисколорации твердых тканей зубов

Хромогенные бактерии

Недостаточная гигиена полости рта приводит к дисколорациям



ВНУТРЕННИЕ ДИСКОЛОРАЦИИ

Внутренние дисколорации твердых тканей зуба могут быть следствием травмы или заболеваний, возникших во время развития зуба, а также после эндодонтического лечения.

- Тетрациклиновые зубы
- Флюороз
- Кариозные поражения
- Пигменты из реставрационных материалов и бондинговых систем




ИЗМЕНЕНИЕ ОТТЕНКА ЗУБА: КЛАССИЧЕСКАЯ ШКАЛА VITA

Отбеливание зубов на 7 тонов – это хороший результат! (например с A3,5 до A2)

Сортировка оттенков по шкале VITA от светлого к темному:

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4.

Точная сортировка по яркости невозможна.

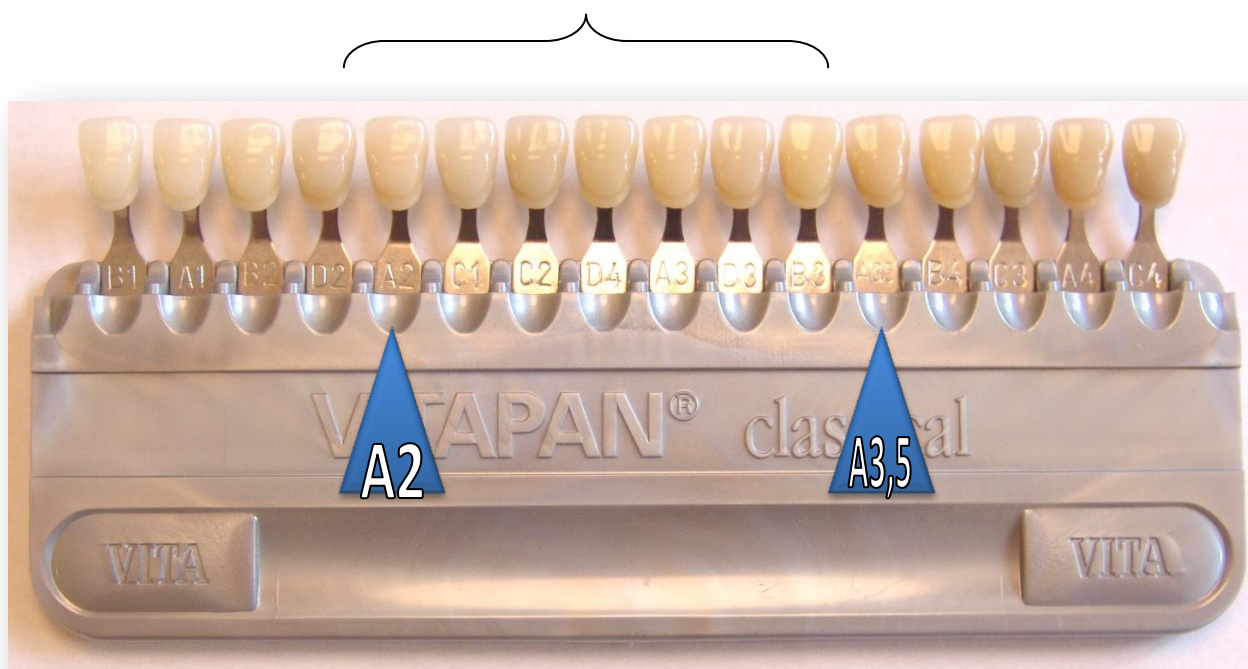

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ

Всегда делайте фотоснимки до и после процедуры отбеливания и документируйте оттенок!



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ:
POWER WHITENING YF40%
МОЩНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАМПЫ



ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ POWER WHITENING YF40%

- изменение цвета одного зуба или его части (цвет одного зуба отличается от соседних зубов);
- окрашивание всех зубов или отдельных групп зубов;
- косметическое отбеливание зубов.

ПРЕИМУЩЕСТВА POWER WHITENING YF40%

- Универсальное применение: один материал для большинства клинических случаев:
 - ✓ отбеливание витальных и девитальных зубов
 - ✓ отбеливание одного или нескольких зубов, а также части зуба
 - ✓ интракоронарное отбеливание зуба после эндодонтического лечения
- Простое и быстрое использование, как правило, в одно посещение
- Время аппликации – 3 сеанса по 15-20 минут
- Химическая активация – не требует использования специальной лампы

POWER WHITENING YF40%

Гель 40 % пероксида водорода (в смешанном состоянии 32%)

Двухкамерный шприц – гигиеничное использование и всегда свежая формула для наилучшего результата

Гель высокой вязкости – не растекается при нанесении на зубы

Вскрытый шприц можно закрывать колпачком и использовать для следующего пациента с новой смешивающей канюлей

колпачком и использовать для следующего пациента с новой смешивающей канюлей

GINGIVA PROTECTOR

Средство для защиты десны – жидкий коффердам

Выпускается в однокомпонентном шприце

Наносится непосредственно на десну шириной 3 – 4 мм и 0,5 – 1 мм на зубы

Фотополимеризация с помощью лампы в течение 30 – 40 секунд

AFTER WHITENING MOUSSE

Мусс для снятия чувствительности и реминерализации зубов

Содержит 30 % ксилита, 4,2% нитрат калия и 1450 ppm фторида натрия

Приятный фруктовый вкус

Наносится после процедуры отбеливания и возможно использование в домашних условиях

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Набор POWER WHITENING YF40%:

- Отбеливающий гель PW YF40% пероксида водорода в шприце 2,5 мл
- Гель для защиты десны GINGIVA PROTECTOR (жидкий коффердам) в шприце 1,5 г
- Мусс для снятия чувствительности и реминерализации зубов AFTER WHITENING MOUSSE в шприце 1,2 мл