

**«АЛЬВОСТАЗ» (губка №1)  
компресс гемостатический и антисептический для альвеол**

**Показания**

Для профилактики и лечения альвеолитов. Вносится в лунку удаленного зуба.

**Состав и свойства**

Трикальций фосфат  
Эвгенол  
Масло оливковое  
Гемостатическая губка  
Йодоформ

«Альвостаз» (губка №1) представляет собой специальное средство для профилактики и лечения альвеолита. Помещенный в альвеолу «Альвостаз»-губка быстро снимает воспаление и боль. Препарат оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно рассасывается в лунке зуба.

Лечебный состав не вызывает воспаления слизистой оболочки полости рта. При использовании материала как профилактического средства, препарат в самое короткое время способствует безболезненному заживлению лунки зуба.

**Противопоказания.**

«Альвостаз» (губка №1) противопоказан больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода.

**Способ применения**

После удаления зуба необходимо провести туалет лунки и добиться образования кровяного сгустка. При необходимости, в связи с опасностью возникновения воспаления, следует поместить в лунку «Альвостаз»-губку. Поверх губки можно наложить сухой марлевый тампон. При травматичном удалении зуба поверх губки могут быть наложены швы. Губка в лунке зуба полностью рассасывается.

Только для местного применения.

**Упаковка и хранение**

Материал расфасован в баночки, содержащие 30 губок размером 1×1 см, пропитанных лечебным составом.

Хранить в сухом прохладном месте.

Срок годности – 3 года.