

“ГУТТАПЛАСТ”
жидкость для распломбирования корневых каналов зубов

Показания и свойства

Перелечивание корневых каналов, ранее пломбированных гуттаперчей.

В случаях повторного пломбирования корневого канала применяют специальную жидкость для распломбирования канала, запломбированного гуттаперчей, облегчающую проведение подобных манипуляций.

Состав

Эвкалиптол

Цитраль

Способ применения

1. Метод для распломбирования каналов при одном посещении.

Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. С помощью зонда ввести две капли жидкости в полость зуба, а затем в каналы и оставить на 1 мин. с целью размягчения гуттаперчи.

Затем удалить размягченную гуттаперчу с помощью эндодонтического инструмента для обработки корневых каналов, пока не будет достигнут апекс. Периодически нужно добавлять свежий растворитель и промывать канал гипохлоритом натрия.

2. Метод для распломбирования каналов при двух посещениях.

Обработать механическим путем камеру и вход в каналы настолько широко, насколько это представляется возможным. Смочить ватный тампон жидкостью для распломбирования и поместить в корневой канал, слегка спрессовав тампон. Затем закрыть временной пломбой до следующего посещения. Через 1-3 дня вскрыть временную пломбу и провести распломбирование размягченной гуттаперчи механическим путем. Это не будет представлять особой трудности. После распломбирования канал следует промыть, обезжирить и просушить с целью подготовки для последующего пломбирования.

Меры предосторожности. Исключить попадание в пищевод.

Упаковка и хранение

Жидкость расфасована в стеклянную тару по 13 мл.

Меры предосторожности. Жидкость воспламеняема. Хранить вдали от источников возгорания при комнатной температуре в защищенном от солнечных лучей месте.

Срок годности – 3 года.